

OnSite Covid 19 IgG og IgM hurtigguide

Det gjøres oppmerksom på at dette er en hurtigguide for utførelse av testen. Når testen tas i bruk første gang henvises det til å lese hele pakkevedlegget.


Prøvemateriale: Serum, Plasma, Fullblod (fingerstikk, EDTA rør eller Citrat rør) Se pakkevedlegg for prøvetakingsprosedyre.



Sørg for at prøvemateriale og alle test komponenter har romtemperatur.


Når du er klar til testing åpnes test pakken med kassetten og plasser den på ren og flat overflate. Merk kassetten med pasientens ID nr.

3

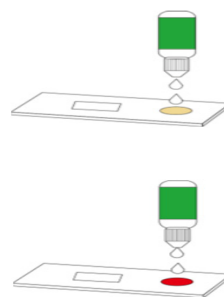

Umiddelbart tilfør 2 dråper (~70-100 µL) deteksjons buffer til S brønnen av test kassetten Sørg for at det ikke er noen bobler.

Sett på stoppe klokke

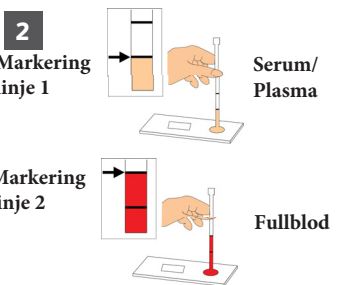

2
Markering linje 1

Serum/
Plasma

Markering linje 2

Fullblod

Fyll kapillæret med riktig prøvevolum etter valgte prøvemateriale. SE MARKERINGS LINJE.

Hold pipetten vertikalt og drypp en 1 dråpe (~10 µL) med serum, plasma eller fullblod (~20 µL) til prøve brønn på test kassetten. Sørg for at det ikke er bobler

4



Les av resultatet etter 10-15 minutter Positivt resultat kan bli synlig så tidlig som 1 minutt.

Negativt resultat må bli bekreftet etter 15 minutter.

Man kan benytte en fast pipette om man heller ønsker det istedet for kapillærene. Trenger da pipette med riktig volum (10ul ved serum) eller 20 ul (ved fullblod).

TOLKNING AV RESULTAT:



POSITIVT RESULTAT: Dersom det i tillegg til en synlig C linje enten G eller M linje utvikles farge, eller at både G og M linje utvikler farge indikerer testen SARS-CoV-2 IgG og/eller IgM antistoffer detektert.

Resultatet er positivt.

NEGATIVT RESULTAT: Dersom bare C linjen er synlig og ingen synlig farge i både M og G linjen. Indikerer det ingen SARS-CoV-2 IgG eller IgM antistoffer detektert. Resultatet er negativt.



DERSOM INGEN C LINJE VISES ER TESTEN UGYLDIG